



GEBRAUCHSANLEITUNG

Einmal-Beißring



Schulungsempfehlung:

Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1.0 Allgemeines

Hersteller:

Key Surgical GmbH

Zum Windpark 1

23738 Lensahn


Telefon: + 49 4363 905900

Telefax: + 49 4363 90590590

2.0 Zweckbestimmung / Aufbau

Zum Einsatz bei gastrointestinalen Endoskopien oder Bronchoskopien. Die Beißringe verhindern, dass der Patient während der Untersuchung auf das Endoskop beißen kann und beugen so Schäden an den Geräten vor.

Die Einmal-Beißringe sind wie folgt aufgebaut:

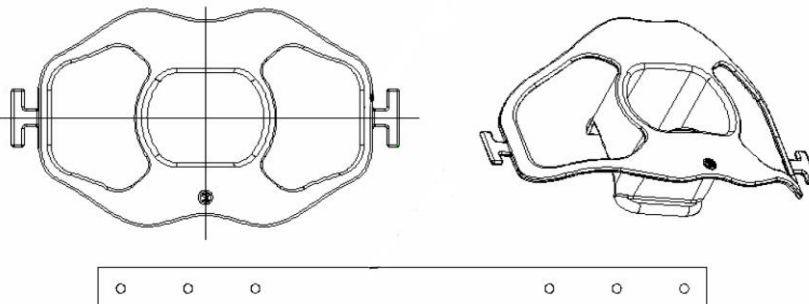

3.0 Abmessungen der Einmal-Beißringe

Model	Beißring (mm)	Länge (mm)	Länge Halteband (mm)	Breite Halteband (mm)
26004/ 26003	31x30x24,5	86,4	550	20
26002	24x22x21	71	550	20

4.0 Beschaffenheit / Produkteigenschaften

1. Der Beißring ist glatt, sauber, ohne Unebenheiten und Grate.
2. Die Haltebänder sind weich, elastisch und latexfrei.
3. Große seitliche Öffnungen / atraumatische Geometrie

5.0 Werkstoffe

Die eingesetzten Rohstoffe der Beißringe sind in folgender Auflistung angegeben:

Nr.	Produktbestandteil	Materialbezeichnung	Standard Nr.
1	Beißring	PP	YY/T 0242-2007
2	Halteband	Spandex (Elastan), TPE, Terylene (Polyester)	-

6.0 Spezifikation der mit dem Produkt verwendbaren Instrumente

- Endoskope

7.0 Vorbereitung

1. Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit und Gebrauchstauglichkeit des Beißrings.
2. Bitte untersuchen Sie den Beißring auf Beschädigungen, Verunreinigungen usw. Sollten Sie eine Unregelmäßigkeit ausmachen, nutzen einen andere Beißring.

8.0 Anwendung

1. Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch.
2. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Beißring.
3. Stecken Sie den Beißring vorsichtig in den Mund des Patienten und vermeiden Sie, dass Ihre Finger sich zwischen Beißring und den Zähnen des Patienten befinden. Stützen Sie dabei den Kopf des Patienten, um das Halteband zu befestigen.
4. Entfernen Sie den Beißring vorsichtig nach der Untersuchung und entsorgen Sie diesen, wie medizinischen Abfall gemäß der geltenden Landesbestimmungen.

9.0 Hinweis auf Gefahren / Warnhinweise

1. Die Beißringe sind zum einmaligen Gebrauch vorgesehen. Entsorgen Sie diese nach dem Gebrauch, eine hundertprozentige Aufbereitbarkeit kann nicht gewährleistet werden. Kreuz-Kontaminationen können entstehen und Komplikationen verursachen.
2. Sollten Sie scharfe Kanten am Beißring feststellen, entsorgen Sie diesen, um Verletzungen des Patienten zu vermeiden.

10.0 Verpackung und Lagerung

Einzelverpackt im PE-Beutel, 50 Einzelverpackungen im Schutzkarton. Kühl und trocken lagern (Luftfeuchtigkeit unter 80%). Nicht dem unmittelbaren Sonnenlicht aussetzen.

11.0 Erklärung der verwendeten Symbole



Von Sonnenlicht fernhalten



Trocken aufbewahren



Achtung (verweist auf Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanweisung)



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



Nicht wiederverwenden



unsteril