

T-EZ Pro™ Cleaning Indicator

REF EZ-015-100

Instructions for Use:

1. Remove T-EZ Pro from packaging immediately prior to use.
2. Snap T-EZ Pro onto tray. T-EZ Pro can be run in an empty or full load.
3. Check the program and start the cleaning cycle.
4. Once the cleaning cycle is completed, assess the cleaning performance of the machine and cycle.

a. A clean metal surface =
successful cleaning efficiency.



b. If metal surface is not clean,
cycle was not successful.
Compare to assessment aid for
troubleshooting.



5. Record the result of the visual assessment on the batch control form.
6. T-EZ Pro can be disposed with domestic waste.

NOTE: ISO 15883 recommends daily monitoring of the cleaning efficacy

 18-25°C & 64-77°F

 35-70%

 18 months from date of manufacture

For more information and additional languages,
please visit www.keysurgical.com or
<https://biologicalindicators.mesalabs.com/cleaning-indicators/>

T-EZ Pro™ Reinigungsindikator

REF EZ-015-100

Anwenderinformation:

1. Den T-EZ Pro kurz vor der Anwendung aus der Verpackung nehmen
2. T-EZ Pro am Siebkorb fixieren
3. Programm überprüfen und starten, der T-EZ Pro kann sowohl mit als auch ohne Beladung eingesetzt werden
4. Nach Ablauf des Programms Reinigungsleistung visuell bewerten
 - a. Keine Reste der Prüfanschmutzung sichtbar = Reinigung erfolgreich 
 - b. Reste der Prüfanschmutzung sichtbar = Reinigung nicht erfolgreich. Bewertungstabelle auf Fehlerbehebung prüfen 
5. Das Ergebnis der visuellen Bewertung in das Chargenprotokoll eintragen
6. T-EZ Pro kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden

Hinweis: ISO 15883 empfiehlt die tägliche Überprüfung der Reinigungsleistung.



18-25 °C



35-70%



18 Monate ab Herstellung

Vers. 1.0

Mehr Informationen und zusätzliche Sprachen finden Sie auf
www.keysurgical.de oder
<https://biologicalindicators.mesalabs.com/cleaning-indicators/>