

Gebrauchsanweisung Einmal Beißring

Verwendungszweck:

Der Einmal Beißring schützt den Endoskop-Einführschlauch und die Ösophagus-Dilatatoren vor Beschädigungen durch den Patienten.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Bitte lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal anwenden.
- Vorkenntnisse in Handhabung und Bedienung sind erforderlich und unerlässlich. Packen Sie das Instrument sorgfältig aus und untersuchen Sie die Geräte auf mögliche Beschädigungen. Bei Beschädigungen oder fehlenden Gegenständen wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.
- Vermeiden Sie es, Finger zwischen den Beißring und die Zähne des Patienten zu legen, wenn Sie den Beißring in den Mund des Patienten legen.

Benutzerqualifikationen:

Der Bediener dieses Instruments muss ein Arzt oder medizinisches Personal unter der Aufsicht eines Arztes sein und eine ausreichende Ausbildung in klinischer endoskopischer Technik erhalten haben. Dieses Handbuch erklärt oder diskutiert daher keine klinischen endoskopischen Verfahren.

Gebrauchsanweisung:

- Nehmen Sie eine Seite des Riemens vom Beißring ab, bevor Sie den Beißring in den Mund des Patienten legen.
- Legen Sie den Bissblock in den Mund des Patienten.
- Führen Sie den Gurt um den Hals des Patienten und befestigen Sie ihn wieder am Einmal Beißring.

Lager:

- Dieses Gerät wird steril geliefert geliefert, um diesen Zustand bis zur ersten Verwendung beizubehalten
- Es muss in der sterilisierten Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf Beißring oder dessen Verpackung!
- Lagern Sie die Beißring nicht in der Nähe von aggressiven chemischen Produkten!
- Setzen Sie die Beißring keinem direkten oder indirekten Sonnenlicht oder anderen ultravioletten Strahlen aus!
- Im trockenen Bereich aufbewahren

Reklamationen werden nicht berücksichtigt, wenn die Beißring unsachgemäß gelagert wurden.

Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:









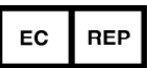





Das Instrument ist steril und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Entsorgen Sie es nach Gebrauch. Der Benutzer muss nicht reinigen, desinfizieren oder sterilisieren.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS:

Nach der Verwendung können diese Produkte ein potenzielles biologisches Risiko darstellen. Handhabung und Entsorgung in Übereinstimmung mit der anerkannten medizinischen Praxis und den geltenden lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften

**Gebrauchsanweisung
Einmal Beißring**

Etikett und Gebrauchsanweisung:

	Nur zur einmaligen Verwendung		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist
	Referenz		Verwendung bis (Ablaufdatum)
	Mit Ethylenoxid sterilisiert		Chargennummer
	Seien Sie vorsichtig, lesen Sie bitte die zugehörigen Dokumente		Herstellungsdatum
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft		Hersteller
	Temperaturbegrenzung		Feuchtigkeitsbegrenzung
	Bleib trocken		Von Sonnenlicht fernhalten



Jiangsu Kangjin Medical Instrument Co., Ltd.

Zhenglu Town, Changzhou, Jiangsu Province, PRC



Shanghai International Holding Crop. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY

DISTRIBUTED BY: KEY SURGICAL

8101 WALLACE ROAD / EDEN PRAIRIE, MN 55344 / USA

(US) PH: 800.541.7995 KEYSURGICAL.COM

(UK) TEL: +44(0)1628 810626 KEYSURGICAL.CO.UK

(EU) TEL: +49 4363 905900 KEYSURGICAL.DE

CE 0123